

# Methocel® 2%



Diese *Gebrauchsinformation* enthält wichtige Produkt- und Sicherheitsinformationen. Bitte lesen Sie sie sorgfältig und bewahren diese zur späteren Verwendung auf.

## Beschreibung

Lösung für Kontaktglasuntersuchungen am Auge. Hergestellt unter aseptischen Bedingungen (die Lösung ist autoklaviert und unter sterilen Bedingungen abgefüllt).

## Inhalt

Hypromellose, Borsäure, Trometamol, Benzalkoniumchlorid (Konservierungsmittel) 0,1 mg/g und Wasser für Injektionszwecke.

## Eigenschaften

Methocel® ist eine hoch viskose, farblose und transparente Lösung aus Hypromellose, die isoton zur Tränenflüssigkeit ist. Für die Herstellung wird eine sehr reine Qualität der Hypromellose verwendet, um eine gleichbleibende Viskosität zu gewährleisten.

## Indikationen

Kontaktflüssigkeit zum Gebrauch während der Untersuchung (z. B. Gonioskopie oder Funduskopie) oder Behandlung des Auges (z. B. Argonlasertrabekuloplastik) unter Verwendung von Kontaktgläsern.

## Anwendungsvorschriften

Vor jedem Gebrauch sollte der konkave Teil des Kontaktglases gründlich gereinigt und mit einem geeigneten Desinfektionsmittel behandelt werden.

Bringen Sie 1–2 Tropfen auf den konkaven Teil des Kontaktglases auf und verwenden Sie es in der üblichen Weise am Auge.

Wenn Sie das Kontaktglas entfernen, neigen Sie den Winkel des Glases, um eine mögliche Saugwirkung zu vermeiden. Danach sollte das Auge mit der Spallampe auf die epitheliale Integrität hin untersucht werden.

Die Verwendung von Kontaktgläsern wird nur ausgebildeten Augenspezialisten empfohlen.

## Anwendungsbeschränkungen

Überempfindlichkeit gegen einen der Inhaltsstoffe.

## Nebenwirkungen

Gelegentlich kann eine vorübergehende Rötung oder Schwellung der Bindehaut nach der Verwendung von mit Methocel® benetzten Kontaktgläsern auftreten.

## Lagerung

Nach Ablauf des auf der Umverpackung aufgedruckten Verfallsdatums nicht mehr anwenden. Nach dem Gebrauch Verschlusskappe wieder aufsetzen. Durch Zurückstellen in den Umkarton vor Licht schützen. Lagerung zwischen 5–25°C. Darf nach dem ersten Öffnen nur innerhalb von 3 Monaten angewendet werden.

## Hinweis

Die Anwendung von Methocel® wird vereinfacht, wenn die Flasche mit Hilfe der Standkappe auf dem Kopf stehend aufbewahrt wird.

## Warnhinweise

Für Kinder unzugänglich aufbewahren. Nur für den äußerlichen Gebrauch. Nicht für den intraokularen Gebrauch.

## Verpackung

30 g Plastiktropfflasche aus Polyethylen



## Hersteller

OmniVision GmbH  
Lindberghstraße 9  
82178 Puchheim  
Deutschland  
Telefon +49 89 84 07 92 30  
Telefax +49 89 84 07 92 40  
www.omnivision.de  
E-Mail: info@omnivision.de

## Vertrieb Österreich

OmniVision GmbH  
Anton Anderer Platz 6  
1210 Wien  
Österreich  
Telefon +43 1 270 70 70  
Telefax +43 1 270 70 20  
www.omnivision.at  
E-Mail: info@omnivision.at

Stand der Information: August 2018




Methocel® ist eine eingetragene Marke der Dow Chemical Company.



OmniVision® OmniVision GmbH, Lindberghstraße 9, 82178 Puchheim, Deutschland, info@omnivision.de

08/2018

Vertrieb durch:

 salensa • medizinischer Bedarf für das Auge • Gabriele Sadlowski e.K. • Fuggerstraße 1a • D-88142 Wasserburg Telefon +49 (0) 83 82/94 30 225 • Fax 94 30 226 • [vertrieb@salensa.de](mailto:vertrieb@salensa.de) • [www.salensa.de](http://www.salensa.de)